

手肌へのやさしさと 高い洗浄力を実現

安心の
ディスポ
タイプ

30個入




極細繊維とスポンジで実現した心地よい 泡だち・泡ぎれ

なめらかな泡がサッと広がり、汚れをしっかりと落とします。洗浄後は泡ぎれもよく、素早くスッキリと洗い流せます。



細かな溝から汚れを優しくかき出す 超極細ブラシ(1711本/cm²)

わずか0.045mmの極細繊維「トレピカ」が、爪先から指紋やしわの中などの細かな溝から汚れをかき出します。

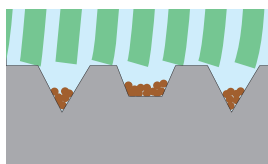


従来のブラシ



毛穴の奥までやさしく洗えるから 洗い上がりすっきり

手にやさしい極細繊維が、細かな汚れまでかき出すので、洗い上がりすっきり。

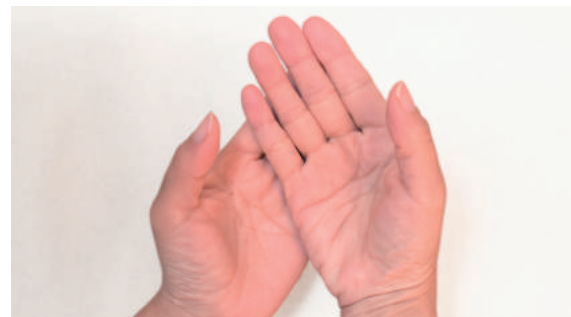

安心安全な電子線照射 滅菌加工

使い切りのディスポタイプの製品を、一つずつ袋に封入し、電子線照射で滅菌しているのでご安心してご使用いただけます。

電子線による滅菌の原理

電子線によって
・増殖するためのDNA(遺伝子)を破壊する <増殖死>
・細胞にダメージを与える <間期死>
で微生物を死滅させます。

おすすめの手洗い手順

1 はじめに



流水で指先から肘関節まで濡らします。
手洗いブラシを十分に濡らし、白いブラシ側に洗剤を5ml程度付け、よく泡立てる

2 手のひら



片手10秒×2

一方の手で手洗いブラシを持ち、手のひら、指の腹側のしわにブラシの毛先がしっかりあたるよう縦横への動きや回すような動きで洗浄します。

3 手の甲



片手10秒×2

手の甲、指の背側を、手のひらと同様にしっかりと洗浄します。

4 指先



片手20秒×2

一方の手のひらにくぼみを作り、白いブラシ側を上向けにのせ、そのくぼみに指を集めるように合わせ、指先や爪の間にブラシの毛先がしっかり入り込むように洗浄します。

5 指



片手20秒×2

ブラシ部で指を包み、ひねりながら前後に動かし、一本一本しっかりと洗浄します。指の間もしっかりと洗浄します。

6 手首
肘間接



片手20秒×2

手首から肘関節までもブラシ全体を使って、前後への動きや回すような動きで洗浄します。

7 最後に



流水でしっかりと流します。

こんな用途にも適しています

- 用手洗浄 器具等の汚れ落としに。
- シンク洗浄 清潔に保っておきたいシンクまわりの洗浄に。



トレピカやわらか手洗いブラシ
(医療施設用) 30個入

GP130

単品サイズ : 約 7cm × 11cm × 1cm
箱サイズ : 約 20cm × 16.5cm × 15cm
材質 : ポリエステル、ポリウレタンフォーム
定価 : 3,000円(税抜)

ご用命は

 内外歯材株式会社

大阪本社 〒543-0062 大阪市天王寺区逢坂2丁目3番10号
電話 06 (6771) 5553 (代) FAX 06 (6779) 7518

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中千種区内山1丁目2番6号
電話 052 (741) 7011 (代) FAX 052 (741) 7014